

## BAG - DryCheck

Samolepící chemický indikátor pro použití v sterilizátorech sterilizujících horkým vzduchem.

**KATALOG. ČÍSLO:** 7513

**POČET KS V BALENÍ:** 1000 (500)

**POPIS:**

BAG-DryCheck jsou papírové samolepící obdélníčky o rozměrech 19 mm x 31 mm s nápisem „DRY HEAT INDICATOR“ ve spodní polovině obdélníčku a chemickým testem zelené barvy v podobě proužku lemujícího horní hranu indikátoru. Ve spodní části testu je uvedeno číslo šarže („LOT“). Jedná se o chemický indikátor, který barevnou změnou ze zelené na černou reaguje na styk se sterilizačním médiem, tedy proudícím horkým vzduchem o teplotě 160°C a vyšší.

**POUŽITÍ:**

- Umístěte chemický test BAG-DryCheck spolu se sterilizovaným materiálem do sterilizátoru. Test může být umístěn do kazety nebo upevněn resp. přilepen zvenku na sterilizovaný materiál.

- Odstartujte příslušný sterilizační program.
- Po ukončení sterilizačního cyklu se vyhodnotí barevná změna testu.
- Pokud test nebyl nalepen před sterilizací na sterilizovaný materiál, lze ho přilepit po odstranění krycí folie do sterilizačního deníku jako doklad o provedení sterilizace.

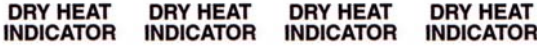
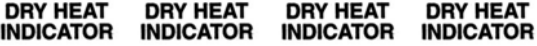
**HODNOCENÍ:**

Indikační proužek zcela změnil barvu ze zelené na černou – test byl vystaven účinkům proudícího horkého vzduchu.

Indikační proužek změnil barvu částečně nebo vůbec ne – kontakt se sterilizačním médiem byl nedostatečný nebo vůbec žádný, sterilizovaný materiál nesmí být použit.

**SKLADOVÁNÍ:** v suchu při pokojové teplotě.

**EXPIRACE:** 5 roků od data výroby.

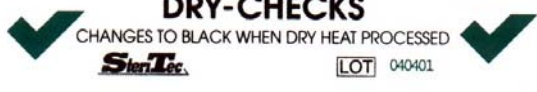

	
INDIKÁTOR PŘED EXPOZICÍ	INDIKÁTOR PO SPRÁVNÉ EXPOZICI

## BAG - DryChecks

Papírový chemický indikátor pro použití v sterilizátorech sterilizujících horkým vzduchem.

**KATALOGOVÉ ČÍSLO:** 75171

**POČET KS V BALENÍ:** 250

	
INDIKÁTOR PŘED EXPOZICÍ	INDIKÁTOR PO SPRÁVNÉ EXPOZICI