

KONTROLA STERILIZACE chemické indikátory

BAG – Integraph

Chemický indikátor pro monitorování sterilizace vlhkým teplem ve sterilizátorech s gravitačním odvodu a ve sterilizátorech s redukčními pulsními cykly.

Katalogové číslo: 7510

Počet ks v balení: 250

POPIS:

BAG – Integraph je oboustranně laminovaný proužek o rozměrech 59 x 22 mm, v jehož pravé horní části jsou dva purpurové pásy široké 3 mm, pod nimi v zelené barvě název indikátoru a zkratka pro popis způsobu sterilizace, tj. sterilizace parou v barvě zelené.

Vpravo dole je také v barvě zelené uvedeno číslo šarže.

V levém horním rohu je uvedena rovněž v barvě zelené norma, kterou indikátor splňuje, pod tím je uvedena v anglickém a německém jazyce třída indikátoru a logo BAG rovněž v barvě zelené. Od něj vede vodorovně jeden zelený pásek k levému okraji proužku, druhý šikmo vzhůru k levému okraji purpurového pásu. Indikátor je určen pro kontrolu sterilizace ve sterilizátorech s gravitačním odvodu a s redukčními pulsními cykly pro teploty 121 a 134°C.

Jedná se o chemický integrátor **třídy 5** (ČSN EN ISO 15882, ČSN EN 11140-1).

Použití:

- 1) Umístěte BAG-Integraph do obalu se sterilizovaným materiálem.
- 2) Odstartujte sterilizační program.
- 3) Po skončení sterilizačního cyklu pečlivě zkontrolujte změnu barvy BAG-Integraphu.
- 4) Zaznamenejte výsledky.


HODNOCENÍ:

Sterilizace vyhovující: úplná změna barvy 2 pruhů z purpurové na zelenou, t.j. byly dodrženy parametry sterilizace (doba expozice, teplota, parametry páry).

Sterilizace nevyhovující: žádná nebo jen částečná změna barvy.

SKLADOVÁNÍ: na suchém místě při pokojové teplotě.

EXPIRACE: 3 roky od data výroby.

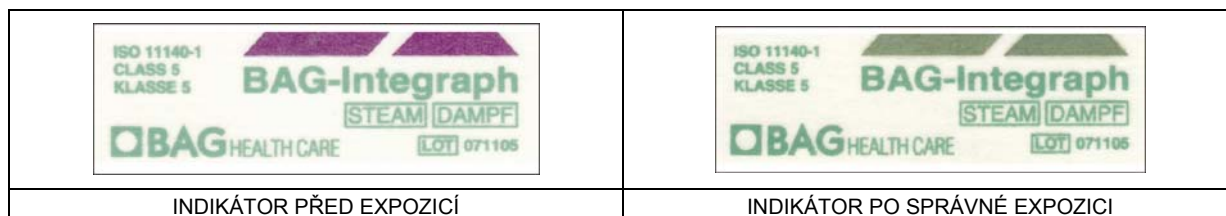

BAG – ChemoStrip 18

indikátor pro zvláštní sterilizační cykly 134°C 18min. (prionové choroby), laminovaný, třída 6

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 7529

POČET KS V BALENÍ: 250

EXPIRACE: 3 roky od data výroby.

